

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/activ-test-sterylizacji-do-autoklawu-twindicator-250500-szt-p-20485.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## ACTIV TEST STERYLIZACJI DO AUTOKLAWU TWINDICATOR 250/500 SZT.

Cena	<b>197,65 zł</b>
Numer katalogowy	<b>48339252</b>
Kod producenta	<b>AC147</b>

### Opis produktu

#### Test sterylizacji TWINDICATOR

Paskowy test wieloparametrowy kontroli procesów sterylizacji parą wodną i nadciśnieniem w autoklawach z możliwością wykorzystania w dużych i małych pakietach (przez podział pasków).

- Test **Twindicator**® ma formę paska o długości 20cm.
- Test **Twindicator**® jest perforowany w połowie długości, co umożliwia łatwe podzielenie paska na dwa krótsze - o długości 10 cm.
- Atrament wskaźnikowy naniesiony jest na pasek w formie linii biegnącej środkiem wzdłuż paska testowego.
- Atrament wskaźnikowy na nieużywanym jeszcze teście ma barwę jasno beżową, a po skutecznej sterylizacji zmienia kolor na czarny.
- Test wieloparametrowy **Twindicator**® dokonuje jednoczesnej kontroli czasu, temperatury i penetracji pary wodnej w czasie procesu sterylizacji.
- **Twindicator**® daje jednoznaczną zmianę koloru („jasny beż” do „czarny”).
- Ze względu na trwałą zmianę koloru wskaźnika po procesie **Twindicator**® może być archiwizowany jako dowód przeprowadzenia skutecznej sterylizacji
- **Twindicator**® spełnia wymogi normy EN 867-1 Klasa D
- **Twindicator**® pakowany jest w opakowania zbiorcze na które składają się z 1 pudełka x 250 szt. testów o długości 20 cm (co jest równoznaczne z 500 szt. testów o długości 10 cm)

#### ZALETY:

- Ekonomiczność - w zależności od wielkości pakietów poddawanych sterylizacji można decydować o długości paska testowego (możliwość podzielenia paska na pół).
- Uniwersalność - **Twindicator**® pokazuje wynik sterylizacji w dwóch zakresach temperatur (121°C i 134°C).
- Bezpieczeństwo i kompleksowość kontroli dzięki dostosowaniu testu do jednoczesnej kontroli trzech parametrów sterylizacji (czas, temperatura, penetracja pary wodnej)
- Pewność odczytu - kolor atramentu wskaźnikowego zmienia się z koloru jasno beżowego na czarny.
- Zabarwienie atramentu wskaźnikowego jest trwałe (nie wybleknie, nie zamaże się), dzięki czemu dokumentacja

---

procesu sterylizacji pozostaje do wglądu przez długi czas.  
- Zgodność ze standardami europejskimi i amerykańskimi  
(stały nadzór FDA w USA to gwarancja najlepszej jakości)

**Ilość:** 2 x 250 szt. w opakowaniu