

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/basic-2w1-kawitacja-ultradzwieki-p-44272.html>



BASIC 2w1 Kawitacja+Ultradźwięki

Cena	2 347,64 zł
Numer katalogowy	1038542884
Kod producenta	CNNV-233
Kod EAN	5907589351934

Opis produktu

Urządzenie do kawitacji BASIC 2w1 peeling kawitacyjny, ultradźwięki

Kawitacja - Peeling kawitacyjny stosowany jest do oczyszczania skóry z zanieczyszczeń, poprawia mikro-ciążenie za pomocą technologii ultradźwiękowej. Jest doskonałą alternatywą dla manualnego oczyszczania. Aparat do kawitacji można stosować jako samodzielny zabieg lub jako dodatek do pełniejszych zabiegów kosmetycznych. Urządzenie do kawitacji stosuje prąd do wytwarzania drgań o częstotliwości 28000 razy na sekundę. Wytwarzane drgania pozwalają na oczyszczenie porów skóry z zanieczyszczeń, gdzie nie dotrzemy przy myciu twarzy.

Ultradźwięki wykorzystują fale dźwiękowe niesłyszalne dla ucha ludzkiego, działa milion razy na sekundę (1 MHz). Fala ultradźwiękowa może pobudzić tkanki skóry i poprawić przepuszczalność błony, zmniejszenie zmarszczek. Zabiegi z wykorzystaniem ultradźwięków dają znakomite rezultaty widoczne już po pierwszym zastosowaniu, przez co są najchętniej wybieranymi zabiegami w gabinetach kosmetycznych, ośrodkach Spa czy medycyny estetycznej.

Zastosowanie: Peeling kawitacyjny

Do oczyszczania skóry z martwych komórek i zanieczyszczeń. Poprawa mikro-ciążenia, dotlenienie i odżywienie skóry.

Przeciwwskazania: przerwana ciągłość skóry, ciąża, uczulenie na prąd, rozrusznik serca, metalowe implanty, nowotwory oraz gorączka.

Ultradźwięki

- likwidacja drobnych zmarszczek,
- rozstępów, tkanki tłuszczowej, cellulitu oraz blizn.
- odświeżają i oczyszczają skórę.

Przeciwwskazania: ciąża, nowotwory, metalowe implanty, rozrusznik serca, przerwana ciągłość skóry, zaburzenia czucia, stany gorączkowe oraz zapalne, nerwica wegetatywna oraz gruźlica.

Przy wykonywaniu zabiegów na ciało należy zachować ostrożność w okolicach karku, serca i gruczołów dokrewnych.

Sposób użycia: Peeling kawitacyjny

Włączamy aparat, ustawiamy czas około 15 minut. Skórę przecieramy wilgotnym wacikiem nasączonym tonikiem. Szpatułkę nachylamy pod kątem 45 stopni do skóry, po czym delikatnie, nie dociskając przesuwamy po skórze za zwilżonym wacikiem. Intensywność dobieramy do odczuć klienta. Klient może czuć delikatne pischczenie w uszach lub też metaliczny posmak w ustach.

Ultradźwięki

Zabieg z ultradźwiękami polega na wtłaczaniu za pomocą głowicy substancji czynnych. Na skórę nakładamy odpowiednią ampułkę, na nią наносimy żel do ultradźwięków, dzięki któremu fala przeniknie w głąb skóry. Zabieg wykonujemy przesuwając głowicą powoli po skórze ruchem okrężnym. Podczas zabiegu wytwarzane jest przyjemne ciepło, które relaksuje oraz przyspiesza metabolizm, przez co cenne związki wnikają głębiej w skórę. Zabieg wykonujemy około 15 minut.

Elementy składowe: Baza, kabel zasilający, szpatuła do kawitacji, 2 elektrody do ultradźwięków, gwarancja, instrukcja obsługi.