

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/basic-darsonval-high-frequency-p-44198.html>

## BASIC Darsonval - High Frequency



Cena	<b>880,20 zł</b>
Numer katalogowy	<b>1038542881</b>
Kod producenta	<b>CNNV-201</b>
Kod EAN	<b>5907589350777</b>

### Opis produktu

Urządzenie do przeprowadzania zabiegu D'arsonwalizacji. Prądy D'arsonwala są to prądy wielkiej częstotliwości o gasnącym przebiegu fali, gdzie przerwa jest 500 razy dłuższa niż czas trwania impulsu. Urządzenie proste w obsłudze, niezbędne w codziennej pracy w gabinetach kosmetycznych, odnowy biologicznej, Spa czy medycznych.

Darsonwalizacja ma zastosowanie: przy leczeniu nerwobóli, świądu, przy zaburzeniach czucia, łojotoku, łysieniu plackowatym, pobudzeniu krążenia, przy dezynfekcji skóry, przed i po woskowaniu, po mechanicznym oczyszczaniu cery, przy opryszczce, przy makijażu permanentnym ust.

Przeciwwskazania do darsonwalizacji miejscowej: trądzik różowaty, przerwana ciągłość skóry, stany alergiczne, cera naczyniowa, teleangiektazje

Przeciwwskazania do darsonwalizacji ogólnej: nadciśnienie, ciąża, nadpobudliwość nerwowa, choroby serca, stany zapalne, gorączka, astma, obrzęki, przerwana ciągłość skóry.

Na oczyszczoną skórę przykładamy pelotę, następnie włączamy urządzenie i przejeżdżamy pelotą po skórze. Zabieg ten wykonujemy około 5- 10 minut. Podczas zabiegu wytwarza się ozon który działa bakteriobójczo i dezynfekująco na skórę. W zależności od zabiegu używamy różnych pelot. Do twarzy i ciała używamy grzybka, do miejsc trudno dostępnych łyżeczka, do szyi odpowiednią z łukiem oraz pelotę do mikromasażu.

Elementy składowe:

- baza,
- rękojeść do pelot,
- 3 peloty: łyżeczka, punktowa i grzybek.
- kabel zasilający,
- gwarancja,
- instrukcja obsługi.