

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/beauty-system-urządzenie-kombajn-kosmetyczny-9w1-26-programow-p-44287.html>



## BEAUTY SYSTEM URZĄDZENIE KOMBAJN KOSMETYCZNY 9W1 26 PROGRAMÓW

Cena	<b>44 292,64 zł</b>
Numer katalogowy	<b>1038462647</b>

### Opis produktu

Urządzenie kosmetyczne - Kombajn kosmetyczny OVER-1031 TOTAL FACE 9w1 26 programów

Łatwe w obsłudze wielofunkcyjne urządzenie, profesjonalnej, cenionej w Europie, włoskiej firmy Over line. Posiada unikalny design doskonale pasujący do każdego gabinetu kosmetycznego, Spa & Wellness. Posiada cyfrowy wyświetlacz opisujący po kolei wszystkie czynności.

Dzięki bogatemu wyposażeniu można wykonać aż 41 zabiegów na twarz, które są już zaprogramowane w urządzeniu i podzielone na 3 grupy: oczyszczanie, odmładzanie, wellness. Dodatkowo przy użyciu kart magnetycznych, można zaprogramować serię zabiegów dla każdego klienta z osobna.

Urządzenie posiada mikrodermabrazję, Radio frequency, galwan, jonoforezę, elektrostymulację, Bio- lifting mikrostymulacji, peeling kawitacyjny, masaż powietrzem oraz kontrolę wilgotności. Ta ostatnia opcja jest przydatna przed każdym rozpoczętym zabiegiem. Pozwala określić rodzaj skóry oraz dobrać odpowiedni zabieg. Aparat w zestawie posiada wymienne głowice do mikrodermabrazji oznaczone odpowiednim kolorem w zależności od rodzaju skóry. Głowice są jednorazowe co zapewnia 100% higienę przeprowadzanych zabiegów. Praca z takim ułatwieniem jest przyjemna, bezpieczna, nie ma możliwości zrobienia wybroczyny dzięki regulacji zasysania w dyszy. Mikrodermabrazja w tym zastosowaniu łączy masaż z funkcją mechanicznego złuszczenia naskórka, bezinwazyjnego. Dodatkowo posiada żel do fal radiowych zawierający substancje z wodorostów, morski kolagen i elastynę. Rączka do R.F w połączeniu z aparatem jest całkowicie bezpieczna, posiada funkcję schładzania, dodatkowym atutem wyróżniającym jest to, iż posiada oba bieguny w jednym aby zamknąć obwód. Takie zastosowanie pozwala koncentrować się energii w jednym obszarze, przez co nie musi przechodzić przez całe ciało.

### Zastosowanie

Mikrodermabrazja - do przeprowadzania zabiegu mechanicznego złuszczenia zrogowaciałego naskórka. Zabieg jest przyjemny i bezbolesny. Urządzenie łatwe w obsłudze. Dzięki głowicą diamentowym o różnej gradacji możemy w krótki sposób uzyskać doskonały efekt gładkiej i promiennej skóry. Urządzenie likwiduje drobne zmarszczki, blizny, rozstępny oraz przebarwienia.

Peeling kawitacyjny - do przeprowadzania takich zabiegów jak peeling kawitacyjny i sonoforeza. Peeling kawitacyjny (alternatywa dla manualnego oczyszczania) stosowany jest do oczyszczania skóry z zanieczyszczeń, poprawia mikrokrajenie za pomocą technologii ultradźwiękowej. Sonoforeza do wtłaczania substancji odżywczych w głąb skóry. Urządzenie składa się z metalowej szpatułki. Urządzenie można stosować jako samodzielny zabieg lub jako dodatek do pełniejszych zabiegów kosmetycznych.

Radio Frequency - do przeprowadzania zabiegów z wykorzystaniem fal radiowych. Zabieg jest bezbolesny, bezinwazyjny polega na stymulowaniu skóry prądami o częstotliwości fal radiowych. Podczas zabiegu wydzielane jest ciepło endogenne (wewnętrzne), następuje ogrzanie tkanek. Przez to zostaje pobudzona produkcja i regeneracja kolagenu, dzięki czemu skóra staje się elastyczna. Dzięki takiemu urządzeniu możemy zredukować zmarszczki, blizny. Warstwy skóry mogą być ogrzane od 45 do 60 stopni.

Galvan - służy do wykonywania zabiegów z wykorzystaniem prądu stałego. Galwanizacja to zabieg elektrolecniczy, w którym wykorzystujemy prąd stały. Wykonujemy ją za pomocą galwanu, urządzeniu, które również wykorzystujemy do zabiegu jonoforezy. Do zabiegu używamy elektrod. Przesuwając elektrodę po powierzchni skóry dochodzi do przemieszczenia jonów wewnątrz organizmu, co powoduje przekrwienie skóry i poprawę napięcia.

Jonoforeza - służy do wykonywania zabiegów z wykorzystaniem prądu stałego, podczas którego wprowadzane są preparaty

---

określone ładunkiem dodatnim lub ujemnym oraz cząsteczki aktywne (substancje odżywcze) w głąb skóry.

Elektrostymulacja - do przeprowadzenia zabiegu wzmocnienia i napięcia mięśni twarzy. Elektrostymulacja wykorzystuje prąd małej częstotliwości, który pobudza mięśnie do wysiłku. Za pomocą impulsów elektrycznych stymuluje tkanki powierzchniowe i przenika w głąb skóry. Urządzenie powoduje pobudzenie przemiany materii, krążenie krwi oraz limfy, uelastycznia, ujędrnia i stymuluje mięśnie.

Bio-lifting mikro stymulacji i- do przeprowadzenia zabiegu stymulacji skórnej w celu odżywienia i dotlenienia tkanek oraz stymulacji fibroblastów i zwiększenie ilości kolagenu. Powoduje przyśpieszenie krążenia krwi. Zabieg przebiega w 4 etapach z których każdy używa innego prądu i trwa 40-45 minut. Program 1 powoduje zwiększenie krążenia krwi, 2 odżywia i detoksykuje poprzez drenaż, 3 to lifting, redukcja zmarszczek, ujędrnianie.

Masaż powietrzem - do przeprowadzania zabiegu przekrwienia, zwiększenia przepływu krwi, odżywienie tkanek. Dzięki połączeniu układu ssącego i koloroterapii powoduje zwiększenie metabolizmu, unaczynienie tkanek, drenaż, oczyszczenie. Zabieg bezbolesny.

Kontrola wilgotności - do określania rodzaju skóry. Dzięki temu w łatwy sposób można dobrać rodzaj zabiegu do skóry.

#### Sposób użycia

Zabieg mikrodermabrazji możemy wykonać na twarzy lub na ciele. Oczyszczamy twarz klienta, następnie włączamy aparat, nakładamy sterylną nakładkę (głowicę), ustawiamy siłę ciśnienia do efektu uzyskanego zabiegu. Następnie przystawiamy dyszę do części ciała klienta i zaczynamy zabieg przesuwać głowicą po skórze bez zasysania. Po chwili dopiero dołączamy zasysanie. Czas trwania zabiegu około 15- 20 minut, wykonujemy go co 7- 10 dni w serii do 6 zabiegów. Może wystąpić delikatne pieczenie na skórze.

Radio Frequency: na oczyszczoną skórę aplikujemy żel sprzęgający ISOL R.F posiadający substancje czynne, które w połączeniu z R.F wytwarzają efekt liftingu i wygładza zmarszczki. Następnie ustawiamy parametry odpowiednie do zabiegu i odczuć klienta. Przez cały czas zabiegu utrzymujemy kontakt z klientem, aby nie doprowadzić do przegrzania. Przykładamy głowicę do skóry i delikatnymi okrężnymi, powolnymi ruchami przejeżdżamy po skórze. Nie zatrzymujemy się w miejscu ani nie odrywamy rączki, gdyż wtedy temperatura staje się wyższa. Głowica po chwili zaczyna się rozgrzewać. Klient może czuć delikatne pieczenie, może pojawić się zaczerwienienie i niewielki obrzęk, który po kilku dniach ustępuje. Zabieg wykonujemy 15 minut po jednej stronie twarzy po czym po drugiej. Po zabiegu resztki żelu usuwamy.

Jonoforeza i Galwanizacja: przy zabiegu galwanizacji na oczyszczoną twarz nakładamy maskę zwilżoną roztworem soli fizjologicznej. Do ręki dajemy elektrodę bierną owiniętą mokrym wacikiem. Elektrodę czynną przykładamy do twarzy i delikatnie przesuujemy po skórze. Intensywność dobieramy do odczuć klienta. Zabieg trwa od 15-20 minut. Powinien być wykonany w serii. Kolejną alternatywą dla takiego zabiegu może być wykonanie jonoforezy. Na aparacie włączamy opcję jonoforezy. Na twarz nakładamy maskę lub substancje odżywcze (produkty powinny być elektrolityczne muszą dysocjować na jony dodatnie i ujemne podczas przepływu prądu) i wykonujemy zabieg jak przy galwanizacji. Klient może czuć metaliczny posmak w ustach.

Peeling kawitacyjny: włączamy aparat, następnie wręczamy klientce elektrodę bierną i ustawiamy czas około 15 minut. Skórę przecieramy wilgotnym wacikiem nasączonym tonikiem. Szpatułkę nachylamy pod kątem 45 stopni do skóry, po czym delikatnie, nie dociskając przesuujemy po skórze za zwilżonym wacikiem. Intensywność dobieramy do odczuć klienta. Klient może czuć delikatne pizczenie w uszach lub też metaliczny posmak w ustach. Sonoforezę wykonujemy natomiast na ampułce oraz żelu do ultradźwięków.

Kontrola wilgotności: wręczamy klientce elektrodę bierną owiniętą mokrą ściereczką. Włączamy urządzenie i przystawiamy głowicę do czoła, policzków i brody. Na ekranie ukaże nam się poziom nawilżenia. Dzięki takiej kontroli możemy określić rodzaj skóry.

Elektrostymulacja: na oczyszczoną skórę наносimy żel sprzęgający, ustawiamy czas, częstotliwość oraz moc, przykładamy rączkę do twarzy, do odpowiednich punktów według schematu.

Masaż powietrzem: na oczyszczoną skórę twarzy наносimy ampułkę przykładamy rączkę, ustawiamy parametry i wykonujemy zabieg.

Bio-lifting mikro stymulacji: na oczyszczoną skórę twarzy przykładamy 2 rączki z nasączonymi wacikami. Wcześniej ustawiliśmy czas, moc i oraz daną fazę, którą chcemy zastosować. Zabieg wykonujemy według podanego schematu.

#### Elementy składowe

Baza, rękojeść do masażu endodermicznego (powietrzem), jednorazowe nakładki do masażu endodermicznego, rękojeść do elektrostymulacji, 2 rękojeści do bio-liftingu, wtyczki do elektrostymulacji i liftingu, rękojeść do galwanizacji i jonoforezy z

---

wymiennymi głowicami, wtyczka do galwanu, rękojeść do kontroli wilgotności, gumowa rurka z dyszą do mikrodermabrazji, wymienne jednorazowe nakładki do mikrodermabrazji, rękojeść do R.F, żel do R.F, szpatała do ultradźwięków, kabel zasilający i elektroda bierna, uchwyt na akcesoria, karta pamięci, sonda do ekranu dotykowego, pedał, instrukcja obsługi i gwarancja.

#### Parametry techniczne

Zasilanie: 230V 50/60Hz

Pobór mocy: 290VA

Wymiary: 440/1008/530mm

Wymiary z opakowaniem: 500/1450/ 530mm

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Stan:** Nowy