

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/bielenda-dns-roller-kosmetyczny-do-twarzy-0-3-mm-p-35026.html>



.BIELEND A DNS ROLLER KOSMETYCZNY DO TWARZY 0,3 mm .

Cena

90,43 zł

Numer katalogowy

1038466627

Opis produktu

DNR ROLLER DO KOSMETYCZNEJ MEZOTERAPII MIKROIGŁOWEJ

Urządzenie przeznaczone do mikronakłuwania skóry w zabiegu kosmetycznej mezoterapii mikroigłowej twarzy i ciała.

Działanie:

- skuteczny i optymalny transport składników aktywnych w głąb skóry
- stymulacja naturalnej produkcji kolagenu i elastyny w skórze
- usprawnienie procesów naprawczych skóry
- reaktywacja funkcji skóry

Długość igieł rollera: 0.3 mm, 0.5 mm, 0.75 mm, 1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm.

PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGU:

- skłonność do tworzenia keloidów (bliznowców),
- ciąża i okres laktacji,
- alergia na metale i składniki aktywne zawarte w koncentratkach do mezoterapii mikroigłowej,
- cukrzyca,
- choroby nowotworowe,
- zaburzenia krzepliwości krwi, przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych, żyłaki,
- stany zapalne na skórze,
- zakażenia bakteryjne, wirusowe i grzybicze skóry,
- autoimmunologiczne choroby skóry,
- trądzik pospolity i różowaty,
- osłabiona zdolność regeneracji skóry,
- stosowanie leków bezpośrednio na skórę,
- przerwana ciągłość skóry, otwarte rany,
- poparzenia,
- znamiona,
- zaburzenia czucia,
- terapia retinoidami (stosowane w ciągu ostatnich 6 miesięcy).

UWAGI OGÓLNE:

- Produkt nie jest wyrobem medycznym, jest to urządzenie kosmetyczne przeznaczone do przeprowadzania zabiegów kosmetycznej mezoterapii mikroigłowej; w przypadku wątpliwości Klienta, czy może poddać się zabiegowi, konieczna jest wcześniejsza konsultacja lekarska,
- przed użyciem zaleca się obowiązkowe odbycie szkolenia z techniki wykonywania mikronakłuwania i stosowania preparatów do zabiegu, przed zabiegiem niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowego wywiadu i wypełnienie karty Klienta,
- roller stosować tylko i wyłącznie dla jednego Klienta,
- bezpośrednio po wykonaniu oraz przed każdym następnym zabiegiem urządzenie należy zdezynfekować,
- nie należy stosować wcześniej użytych rollerów dla następnego Klienta,
- nie sterylizować w autoklawie,
- nie modyfikować lub samodzielnie naprawiać rollera
- do mycia i dezynfekcji stosować odpowiedni preparat do wyrobów medycznych, z właściwą dezynfekcją roller może być używany wielokrotnie dla jednej osoby, do czasu stępienia się igieł,
- roller należy wymienić w momencie, gdy zauważymy, że igły się stępiły (w zależności od rodzaju skóry, wystarczy na około 6 zabiegów),

-
- chronić przed dziećmi,
 - chronić przed wilgocią, wodą i kurzem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Stan: Nowy