

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/bielenda-med-technology-anti-cellulite-body-slim-dns-roller-do-mezoterapii-mikroiglowej-2mm-p-34803.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Bielenda Med Technology Anti - Cellulite Body Slim, DNS Roller do mezoterapii mikroigłowej 2mm

Cena	58,38 zł
Numer katalogowy	1038508940
Kod producenta	BP075

Opis produktu

Bielenda Meso Med, DNS Roller kosmetyczny do twarzy Bielenda Professional 2.0mm

Urządzenie przeznaczone do mikronakłuwania skóry w zabiegu kosmetycznej mezoterapii mikroigłowej twarzy i ciała.

Dzięki mikronakłuciom ROLLEREM do Kosmetycznej Mezoterapii Mikroigłowej Bielenda Professional poprawiamy penetrację składników aktywnych w głąb skóry tworząc nawet 500 tysięcy mikrokanalów w ciągu zaledwie kilku minut! Jesteśmy w stanie zwiększyć absorpcję nawet o 70%.

Długość igieł rollera: 0.3 mm, 0.5 mm, 0.75 mm, 1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm.

Działanie

- skuteczny i optymalny transport składników aktywnych w głąb skóry
- stymulacja naturalnej produkcji kolagenu i elastyny w skórze
- usprawnienie procesów naprawczych skóry
- reaktywacja funkcji skóry

Wskazania do zabiegu

- przeciwdziałanie starzeniu się skóry
- spłykanie blizn potrądzikowych
- niwelowanie rozstępów
- profilaktyka łysienia

Gojenie odbywa się trój etapowo

- wywołanie stanu zapalnego (faza zapalna)
- formowanie się nowych tkanek (faza proliferacyjna)
- modelowanie nowych tkanek (faza remodelingu)

WAŻNE !

- Przed użyciem zalecamy odbycie szkolenia z techniki wykonywania mikronakłuwania i stosowania preparatów z linii Meso Med Program BIELEND A Professional
- Przed zabiegiem niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowego wywiadu i wypełnienie karty klienta
- Roller stosować tylko dla jednej klientki
- Nie sterylizować w autoklawie
- Do mycia i dezynfekcji stosować odpowiedni preparat do wyrobów medycznych
- Roller należy wymienić w momencie, gdy zauważymy, że igły się stępiły

Przeciwwskazania do zabiegu mikronakłuwania

- skłonność do tworzenia keloidów (bliznowców)
- ciąża i okres laktacji
- alergia na metale i składniki aktywne zawarte w koncentratkach do mezoterapii mikroigłowej
- cukrzyca
- choroby nowotworowe
- zaburzenia krzepliwości krwi, przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych, żyłaki
- stany zapalne na skórze
- zakażenia bakteryjne, wirusowe i grzybicze skóry
- autoimmunologiczne choroby skóry

-
- trądzik pospolity i różowaty
 - osłabiona zdolność regeneracji skóry
 - stosowanie leków bezpośrednio na skórę
 - przerwana ciągłość skóry, otwarte rany
 - poparzenia
 - znamiona
 - zaburzenia czucia
 - terapia retinoidami (stosowane w ciągu ostatnich 6 miesięcy)