

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/elite-base-line-kombajn-10w1-p-49327.html>



ELITE BASE LINE kombajn 10w1

Cena	44 807,14 zł
Numer katalogowy	1038543442
Kod producenta	CNOVER1115
Kod EAN	5907589355215

Opis produktu

Urządzenie kosmetyczne ELIT BASE LINE produkowane jest przez cenioną w Europie włoską firmę Technology (marka Overline), pod ścisłym nadzorem naukowców z uniwersytetu Medycznego w Ferrarze, z zachowaniem najwyższych norm bezpieczeństwa. Urządzenie to zostało zaprojektowane w oparciu o zaawansowane technologie. Idealnie dobrane parametry urządzenia oraz przeznaczone do zabiegów kosmetyki ISOL w pełni ze sobą współgrają, umożliwiając w ten sposób pracę na najwyższym poziomie.

To innowacyjne urządzenie przeznaczone jest do zabiegów:

1. Kontrola wilgotności skóry
2. Brush
3. Peeling kawitacyjny (sonoforeza, jonoforeza)
4. Galwanizacja
5. Mikrodermabrazja diamentowa
6. Fala radiowa bipolarna
7. Elektroporacja
8. Bio-lifting
9. Elektrostymulacja
10. Masaż endodermiczny (podciśnieniowy)

Opcjonalnie:

- Wapozon
- Fala radiowa multipolarna
- Darsonwal
- Maski LED

KONTROLA WILGOTNOŚCI SKÓRY

wykorzystywane do określania rodzaju skóry na podstawie procentowego udziału wody w skórze. Dzięki temu w łatwy sposób można dobrać odpowiedni zabieg.

BRUSH

Jest to jedna z metod oczyszczania skóry. Ma delikatne mechaniczne działanie i wykonywany jest przez różnego rodzaju szczotki.

PEELING KAWITACYJNY - 25 kHz

Jest to bezbolesna metoda oczyszczania skóry, alternatywa dla tradycyjnej metody manualnego oczyszczania twarzy. W opisywanym modelu zabieg peelingu kawitacyjnego połączony jest z sonoforezą i jonoforezą. Dzięki specjalnie zaprojektowanej rękojeści wykonać można aż 12 różnych zabiegów dedykowanych dla osób z różnymi problemami skórnymi.

SONOFOREZA

Wykorzystuje ultradźwięki, za pomocą których wtłaczane są substancje aktywne z preparatów w głąb skóry. W czasie

sonoforezy wykonywany jest tzw. mikromasaż dzięki zastosowaniu fali dźwiękowej o zmienionym przepływie. Masaż taki poprawia mikrokrażenie, dotlenienie i odżywienie komórkowe .

JONOFOREZA

Jest zabiegiem elektroleczniczym, polegającym na wprowadzeniu do tkanek leczniczych jonów za pomocą prądu stałego (prądu galwanicznego).

GALWANIZACJA

Wykorzystuje działanie prądu stałego, który płynie przez tkanki pomiędzy dwiema elektrodami. Prąd elektryczny powoduje ruch odpowiednich anionów oraz kationów wzdłuż przesuwanych elektrod. Dochodzi do zwiększenia przepuszczalności błon w tkankach, co prowadzi do zwiększenia metabolizmu i lepszego odżywienia tkanek.

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA

Jest to zabieg mechanicznego ścierania naskórka (jego warstwy rogowej), dzięki któremu likwidujemy drobne zmarszczki, blizny i przebarwienia, stymulujemy mikrokrażenie, zwiększamy absorpcję składników aktywnych z preparatów, normalizujemy pracę gruczołów łojowych, stymulujemy produkcję kolagenu i elastyny.

W urządzeniu zastosowano mikrodermabrazję najnowszej generacji, ze specjalnie zaprojektowaną dyszą, dzięki której nie ma możliwości zrobienia siniaka, tak jak w przypadku nieumiejętnej pracy z klasyczną dyszą. Dodatkowym atutem są jednorazowe głowice z równomiernym nasypem diamentu. Zapewnia to pełną sterylność zabiegu.

FAL RADIOWYCH - bipolarna

Zasada działania RF opiera się na wywołaniu efektu termicznego w tkankach (wytworzenia ciepła endogennego). Ciepło wytworzone w skórze stymuluje fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny. Dzięki temu zwiększa się gęstość, elastyczność i napięcie skóry, poprawia się owal twarzy oraz koloryt skóry.

Wytworzone ciepło w tkankach dodatkowo powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, przez co poprawia się odżywienie i utlenienie skóry, a także jej metabolizm. W efekcie skóra jest bardziej jędrna, a zmarszczki ulegają spłyceniu. Jest to zabieg bezbolesny, podczas którego pacjenci towarzyszy przyjemne ciepło.

ELEKTROPORACJA

To nowoczesna i uniwersalna metoda umożliwiająca przenikanie makrocząsteczek z przestrzeni międzykomórkowej do wnętrza komórek dzięki kanałom tworzącym się, pod wpływem pola elektromagnetycznego.

BIO - LIFTONG

Mikro stymulacja , która służy do przeprowadzenia zabiegu stymulacji skórnej w celu odżywienia i dotlenienia tkanek oraz stymulacji fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny. Powoduje poprawę krążenia krwi. Zabieg przebiega w 4 etapach z których każdy używa innego prądu i trwa 40-45 minut. Program 1 powoduje zwiększenie krążenia krwi, 2 odżywia i detoksykuje poprzez drenaż, 3 to lifting, redukcja zmarszczek, 4 ujędrnianie.

ELEKTROSTYMULACJA BIPOLARNA

Pobudza mięśnie w delikatny i selektywny sposób. Służy do przeprowadzenia zabiegu wzmocnienia i napięcia mięśni twarzy. Elektrostymulacja wykorzystuje prąd małej częstotliwości, który pobudza mięśnie do wysiłku. Za pomocą impulsów elektrycznych stymuluje tkanki powierzchniowe i przenika w głąb skóry. Urządzenie powoduje pobudzenie przemiany materii, krążenie krwi oraz limfy, uelastycznia, ujędrnia i stymuluje mięśnie.

MASAŻ ENDODERMICZNY (podciśnieniowy)

Technika, która używa próżni, aby powodować miejscowe przekrwienie oraz zwiększyć przepływ krwi. Stymuluje system mikrokrażenia, przez co pozwala na większe odżywienie tkanek i dostarczenie do komórek większej ilości tlenu. Masaż podciśnieniem powoduje zwiększenie metabolizmu, unaczynienie tkanek oraz działa jak drenaż.