



Ice Derma Roller Kup! SS!

Cena	92,39 zł
Numer katalogowy	1038512532
Kod producenta	VB031

Opis produktu

Oryginalny pełnowymiarowy Ice Roller (19x8,5cm)

Przyrząd został wyprodukowany z najlepszej jakości materiałów, zapewniających jego trwałość. (Uwaga na słabej jakości, łamliwe zamienniki). Ergonomiczna, chropowata rączka zapewnia pewny chwyt przyrządu. Powłoka rolki została wykonana ze specjalnego tworzywa, wewnątrz której znajduje się żel utrzymujący niską temperaturę skuteczniej od aparatów wyposażonych w stalową rolkę. Neutralny materiał rolki nie uczula (metalowe rolki mogą powodować objawy alergii, u osób uczulonych na nikiel). Urządzenie oprócz pracy lodówki, nie generuje żadnych kosztów dla salonu.

Zastosowanie:

- po zabiegach mezoterapii mikroigłowej,
- po zabiegach z użyciem lasera (IPL, E-LIGHT),
- w przypadku podrażnień wywołanych zabiegami kosmetycznymi,
- po zabiegach depilacji,
- po ukąszeniach owadów,
- podczas bólów i urazów mięśniowych,
- w przypadku opuchniętych oczu.

ICE ROLLER można stosować codziennie w celu odświeżenia i odmłodzenia skóry!

Działanie:

- przyspieszenie procesów gojenia,
- łagodzenie podrażnień skóry po zabiegach kosmetycznych,
- zmniejszenie zaczerwienienia skóry,
- zmniejszenie bólu,
- odświeżenie skóry,
- zwiększenie napięcia skóry.

Jak używać ICE ROLLER'a?

- 1.Aby ICE ROLLER był gotowy do pracy należy trzymać go w zamrażalniku lodówki lub zamrażarce.
- 2.Rolluj wg. potrzeb płynnymi ruchami, z umiarkowaną prędkością, nie dociskając za mocno rolki do skóry.
- 3.Rolkę należy czyścić przy użyciu spray'u do dezynfekcji.
- 4.Przyrząd nie wymaga, żadnej specjalnej konserwacji.