

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/urzadzenie-infuzja-tlenowa-rf-mikrodermabrazja-p-44354.html>

Urządzenie infuzja tlenowa RF mikrodermabrazja

Cena	60 655,36 zł
Numer katalogowy	1038543158
Kod producenta	CNOVER1160
Kod EAN	5907589354485

Opis produktu

Piękna, nawilżona i odmłodzona skóra? Tak, teraz jest to możliwe dzięki innowacyjnemu zastosowaniu tlenu w kosmetyce w postaci zabiegu jakim jest INFUZJA TLENOWA. Jest to nowoczesny zabieg wykorzystujący czysty tlen dla osiągnięcia widocznych i trwałych efektów już po pierwszej aplikacji. Zabiegi infuzji tlenowej nie są jeszcze rozpowszechnione w Polsce, natomiast 97% Salonów Piękności, które zdecydowały się na zakup urządzeń Overline zawierających infuzję tlenową notują wzrost liczby klientów o 70% co potwierdzają opinie użytkowników potwierdzają.

„Odkąd przeprowadzamy zabiegi infuzji w salonie, nasze klientki są tak zadowolone, że polecają je kolejnym paniom. A ponieważ efekty zabiegów takie jak napięcie skóry, wygładzenie, mocne nawilżenie i rozjaśnienie utrzymują się bardzo długo chętnie wracają na kolejne sesje zabiegowe.”- Salon Lublin.

Tlen jest pierwiastkiem, którego skóra potrzebuje w każdym wieku aby prawidłowo funkcjonować. Poprzez zanieczyszczone środowisko oraz niezdrowy tryb życia coraz mniej tlenu trafia do komórek naszej skóry. Z upływem czasu pogorsza się jej wygląd, staje się sucha, matowa i mało elastyczna. Aby spowolnić niekorzystne procesy starzenia wskazanym jest stosować specjalistyczną tlenoterapię - bezpieczną, naturalną i nieinwazyjną metodę pielęgnacji skóry. Infuzja tlenowa jest to zabieg polegający na wtłaczaniu składników aktywnych w głąb skóry przy wykorzystaniu czystego tlenu. Dostarczony tlen odżywia komórki, przyspiesza metabolizm komórkowy, zwiększa napięcie skóry i spowalnia procesy starzenia. Tlen działa odżywczo i tonizująco, pobudza oddychanie komórek dając skórze bardziej elastyczny, zwarty i świetlisty wygląd. Zabieg jest nieinwazyjny, nie ma żadnych skutków ubocznych, a dodatkowo jest całkowicie bezbolesny. Tlen ma właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne i powoduje zmniejszenie podrażnień. Ze względu na swoje właściwości i natychmiastowe efekty zabieg ten jest to najchętniej wybierany zabieg przez gwiazdy Hollywood a ich fanką jest m.in Madonna.

„Klienci odczuwają zabieg jako przyjemny i całkowicie bezbolesny. W pierwszej chwili jest to pewne zaskoczenie bo aplikacja ampułki daje uczucie chłodu ale po chwili przyzwyczajenia wrażenia są bardzo pozytywne. 99% Pań po zabiegu od razu widzi efekty. Skóra staje się gładsza, bardziej napięta, zmniejszają się zmarszczki” - Salon Świdnica

Urządzenia kosmetyczne Overline, przeznaczone do wykonywania zabiegów infuzji tlenowej produkowane są przez włoską firmę Technology. Urządzenia te wyposażone są w pompę ze specjalnie opracowanym systemem membran, która gwarantuje odpowiednio dopasowane ciśnienie do składu stosowanych ampułek i wielkości dysz w areografie. Dzięki zastosowaniu systemu membran uniknięto uciążliwego podłączania butli tlenuowych. Idealnie zgrane parametry pozwalają na uzyskanie widocznych efektów w postaci odmłodzenia skóry nawet o 10 lat. Produkcja urządzeń odbywa się pod ścisłym nadzorem naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Modenie z zachowaniem najwyższych norm bezpieczeństwa co daje gwarancję, że dobrane parametry urządzeń oraz przeznaczone do zabiegów kosmetyki w pełni ze sobą współgrają umożliwiając osiągnięcie zadowalających efektów.

Zabieg Infuzji Tlenowej często mylony jest z Oxybrazją co jest dużym błędem gdyż różnica między nimi jest znaczna. Oxybrazja służy do ścierania warstwy rogowej naskórka za pomocą tlenu. W związku z wysokim ciśnieniem aparatury jakie potrzebuje Oxybrazja nie ma tu możliwości wykonania infuzji tlenowej. Cząsteczki składników aktywnych z preparatów pod wpływem ciśnienia jakie posiada urządzenia do Oxybrazji odbijają się od powierzchni skóry bez możliwości wnikięcia w głębsze warstwy. Ponadto konieczność podłączania i wymiany butli z tlenem poza tym że jest uciążliwa to nie daje możliwości ciągłej pracy. Infuzja tlenowa czyli wtłaczanie substancji czynnych do skóry za pomocą czystego tlenu daje dużo lepsze i trwalsze efekty gdyż działamy na głębokie warstwy skóry.

Opisywane urządzenie Overline jest skonfigurowane z zabiegiem Radio Frequency - fale radiowe stymulujące produkcję kolagenu i elastyny, ma działanie wygładzające, tzw. „lifting bez skalpela”, znacznie podnosi rezultaty zabiegów w połączeniu z infuzją tlenową.

Zasada działania RF opiera się na wykorzystaniu efektu cieplnego do odmłodzenia skóry. Fale radiowe stymulują zarówno tkanki powierzchowne jak i głębsze warstwy skóry przez co poprawia ich dotlenienie, odżywienie oraz mikro cyrkulację . Poprzez zwiększenie temperatury wewnątrz skóry następuje zmiana struktury białek kolagenowych, które kurczą się i napinają (efektu liftingu), co w rezultacie prowadzi do regeneracji skóry właściwej poprzez zwiększenie jej spójności. Wzrost temperatury, spowodowany poprzez działanie fal radiowych aktywuje fibroblasty co w konsekwencji prowadzi do wzrostu kolagenu i elastyny. Dzięki temu zwiększa się gęstość, elastyczność i napięcie skóry, poprawia owal twarzy oraz koloryt cery.

Innym bardzo ważnym efektem działania Fal Radiowych jest oddziaływanie na komórki tłuszczowe. W szczególności efekt lipolizy oddziałujący na adipocyty doprowadza do usunięcia kwasów tłuszczowych z rozbitych trójglicerydów i wydalania ich prosto do krwi i obiegu limfatycznego. Następuje usunięcie toksyn, poprawienie krążenie krwi oraz wzmacnia się metabolizm komórkowy.

W urzędzeniu została zastosowana mikrodermabrazja najnowszej generacji. Metoda w porównaniu do starszych rozwiązań jest bezbolesna, nieinwazyjna i nie ma żadnych przeciwwskazań aby ją stosować. Dodatkowo zabieg w tej wersji jest bardzo łatwy wykonaniu. Metoda ta jest wykorzystywana w ośrodkach medycznych i kosmetycznych, a jej efekty sprawiły iż zaczął on zastępować tradycyjne metody. Po mikrodermabrazji zostaje usunięty stary naskórek , dzięki czemu zwiększa się przepuszczalność skóry a tym samym wchłanianie produktów kosmetycznych.

Przewagą tej metody jest fakt iż dzięki zastosowaniu jednorazowych końcówek ściernych unikamy konieczności sterylizacji a co za tym ograniczamy koszty zabiegu czy funkcjonowania gabinetu. Jednocześnie wzmacniamy u klienta poczucie sterylności i profesjonalizmu.

Zastosowanie:

Zabieg infuzji tlenowej przeznaczony jest do regeneracji każdego rodzaju skóry , skóra odwodniona, pozbawiona blasku, z oznakami starzenia, poszarzała, skóra „palacza", skóra pozbawiona jędrności, po kąpielach słonecznych.

Infuzja tlenowa jest zabiegiem bezbolesnym o natychmiastowych efektach i służy do :

- redukcji oznak starzenia
- dotlenienia skóry
- nawilżenia skóry
- regeneracji skóry
- działanie odmładzające

Czas trwania zabiegu: 20 - 40 minut

Zabieg przy użyciu Fal Radiowych jest również bezbolesny a podczas zabiegu towarzyszy pacjentce uczucie przyjemnego ciepła. Efektami zabiegu RF są:

- podniesienie owalu twarzy i podbródka
- ujędrnienie skóry
- redukcja zmarszczek
- zmniejszenie „worków" pod oczami i „kurzych łapek"
- odbudowa kolagenu
- terapia zapobiegająca starzeniu- profilaktyka
- zmniejszenie przebarwień
- redukcja zanieczyszczeń, rozszerzonych porów i stanów zapalnych

Czas trwania zabiegu około 30 minut.

Przeciwwskazania do wykonania zabiegów Fal Radiowych

- ciąża i karmienie piersią
- botox, kwas hialuronowy, złote nici, wypełniacze
- choroby endokrynologiczne
- epilepsja
- zaburzenia czucia
- wszczepiony stymulator lub defibrylator serca, implanty.
- bliznowiec
- nietypowe lub niezdiagnozowane zmiany pigmentacyjne
- wykonany ostatnio peeling mechaniczny w obszarze zabiegu, używanie kremów z retinolem, witaminą C, kwasami owocowymi(w ciągu 3 ostatnich tygodni)
- dermabrazja laserowa wykonana w ciągu ostatnich 3 miesięcy na powierzchni zabiegowej
- cukrzyca
- opalanie (5 tyg) stosowanie samoopalacza(2 tyg)
- choroby bakteryjne, wirusowe skóry oraz stany ropne, przerwana ciągłość skóry
- stan zapalny organizmu, infekcja, temperatura
- antybiotyki, kortykosteroidy
- opryszczka, rany, stany zapalne skóry, łuszczyca
- nowotwory lub przebyta choroba nowotworowa w ciągu ostatnich 5 lat
- wirus HIV
- alergie
- choroby tarczycy
- choroby naczyń, żylaki, popękane naczynka, zapalenie żył
- zaburzenia krążenia obwodowego
- trądzik różowaty

Po zabiegu falami radiowymi zaleca się:

- unikania sytuacji narażających skórę na urazy
 - zbytniego rozgrzewania miejsca poddanego zabiegowi
 - unikać sauny i dużego wysiłku fizycznego
 - unikać opalania zarówno naturalnego jak i w solarium czy też stosowania samoopalacza przez ok 4 tygodnie od zabiegu
- Mikrodermabrazja jest zabiegiem przygotowawczym i można go stosować osobno lub jako wstęp do wcześniej opisanych zabiegów. Po zabiegu Mikrodermabrazji uzyskujemy:
- efekt natychmiastowej i widocznej poprawy stanu i kolorytu skóry
 - delikatny efekt rozjaśnienia skóry
 - spłycenie i wygładzenie drobnych zmarszczek
 - poprawienie napięcia i elastyczności poprzez pobudzanie syntezy kolagenu
 - usuwanie zmian barwnikowych posłonecznych i starczych
 - likwidacja drobnych blizn
 - zamykanie rozszerzonych porów i zaskórników
 - regeneracja szarej i zmęczonej skóry

Czas trwania zabiegu Mikrodermabrazji: 15 - 20 minut

Stosowanie Mikrodermabrazji jest przeciwwskazane w przypadku:

- infekcje wirusowe (opryszczka, liczne brodawki)
- zakażenia bakteryjne (liszajec zakaźny, figówka gronkowcowa)
- zakażenia grzybicze
- trądzik krostkowy i ropowiczy
- uszkodzenia i podrażnienia skóry, nadżerki
- liczne znamiona
- nowotwory skóry i naczyń
- terapia przeciwtrądzikowa
- zabiegi chirurgiczne w obrębie twarzy

Po zabiegu Mikrodermabrazji zaleca się:

- unikanie opalania przez ok 30 dni. Skórę należy chronić przed działaniem promieni słonecznych stosując kremy z filtrem o faktorze min. 30 +
- unikanie kąpeli w chlorowanej wodzie (baseny) do 72 godzin po zabiegu
- picie 8-12 szklanek wody mineralnej dziennie, co zwiększa uelastycznienie skóry
- w celu zniwelowania przebarwień preparaty wybielające należy aplikować 24 godziny po zabiegu mikrodermabrazji 2 razy dziennie
- systematyczną aplikację preparatów regenerujących, odżywczych i nawilżających

Sposób użycia:

Pierwszym etapem zabiegu infuzji tlenowej jest demakijaż. Demakijażu dokonujemy na twarzy, szyi i dekolcie - najlepiej przy pomocy mleczka i toniku. Następnie przy pomocy płatków kosmetycznych zabezpieczamy oczy.

W dalszej kolejności ustawiamy parametry urządzenia i napełniamy aerograf ampułką z serii kosmetyków Isol. Do wyboru mamy dwa rodzaje ampułek : z aktywnym tlenem i komórkami macierzystymi lub z aktywnym tlenem i tripeptydami. Zabieg wykonujemy najpierw po jednej, a następnie po drugiej stronie twarzy. Aerograf należy utrzymywać w pozycji, w której zbiorniczek k z ampułką będzie ustawiony pionowo. Odległość końcówki aerografu od skóry powinna wynosić ok. 1cm. Nie należy przykładać aerografu bezpośrednio do skóry. Po wykorzystaniu całej ampułki należy wyłączyć urządzenie. Ewentualne resztki ampułki pozostałe na skórze można delikatnie wmasować lub wytrzeć. Na zakończenie zabiegu należy położyć maskę kremową lub algową przeznaczoną dla danej cery. Po upływie określonego czasu zmyć maskę.

Elementy składowe:

- baza urządzenia kosmetycznego Elite 1149
- stolik z półkami pod urządzenie
- aerograf do wykonywania zabiegu
- głowica bipolarna do wykonywania zabiegu Fal Radiowych
- głowica do mikrodermabrazji z regulacją siły ssania
- instrukcja obsługi w języku polskim
- 3 letnia gwarancja
- kabel zasilający
- komplet jednorazowych głowic do mikrodermabrazji do cery normalnej, łagodnej, masażu i do ciała
- 5 ampułek 10ml z aktywnym tlenem i komórkami macierzystymi do wykonywania zabiegu infuzji tlenowej
- 5 ampułek 10ml z aktywnym tlenem i tripeptydami do wykonywania zabiegu infuzji tlenowej

Parametry techniczne:

- włoska produkcja pod nadzorem uniwersytetu medycznego w Modenie
- 3 letnia gwarancja na urządzenie
- serwis gwarancyjny i po gwarancyjny w Polsce
- ciśnienie robocze infuzji 2 bary
- zasilanie 230V 50Hz
- szerokość 48cm
- głębokość 44cm
- wysokość 114cm
- waga 45kg