

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/urzadzenie-kombajn-kosmetyczny-17w1-classic-p-44295.html>



Urządzenie kombajn kosmetyczny 17w1 CLASSIC

Cena	10 892,23 zł
Numer katalogowy	1038472058

Opis produktu

Urządzenie kosmetyczne - Kombajn kosmetyczny 17w1 Classic

Kombajn kosmetyczny posiadający 17 funkcji zebranych w jedno urządzenie. Zawiera: wapozon, vacuum, spray, lampę lupę, koloroterapię, mikrodermabrazję, sterylizator UV z podgrzewaczem ręczników, głowice ciepło/zimno, galwanizację, ultradźwięki, peeling kawitacyjny, BIO face lifting, D'arsonval, lampa Wooda, elektrokoagulator, brush.

Jest to urządzenie kompatybilne, które pozwala na wykonanie urozmaiconych zabiegów. Niezwykle prosta obsługa urządzenia zapewnia komfort pracy. Kombajn zajmuje mało miejsca i jest w 100% mobilny.

Zastosowanie

Wapozon- Pomocny w zabiegach oczyszczania, masażu. Otwiera pory, zmiękcza skórę, stosowany jest w celach aromaterapeutycznych do rozluźnienia, leczenia górnych dróg oddechowych. Posiada funkcję ozonu.

Vacuum- służy do oczyszczania porów z zanieczyszczeń i zabrudzeń. Zaskórniki otwarte zostają wyeliminowane, poprawia krążenie krwi dzięki czemu skóra staje się bardziej elastyczna i odżywiona.

Spray- używany do tonizacji skóry, rozpylania mgiełek lub olejków.

Lampa lupa - pomocna przy diagnozie skóry, oczyszczaniu, regulacji brwi, makijażu permanentnym i wielu innych.

Koloroterapia - ma wszechstronne zastosowanie, działa na skórę zależnie od doboru koloru. Może działać odżywczo, uspokajająco, antybakteryjnie, pobudzająco lub leczniczo. Posiada 7 wariantów kolorystycznych.

Mikrodermabrazja - do zwalczania blizn, suchości skóry, łojotoku, trądziku, rozszerzonych porów, przebarwień, do likwidacji drobnych zmarszczek, ujednolicenia kolorytu, odmładzania i pojędrniania skóry oraz do zwalczania rozstępów.

Sterylizator UV z funkcją podgrzewania ręczników - Światło ultrafioletowe jest wykorzystywane do mycia i dezynfekcji narzędzi, natomiast ręczniki, bandaże, materiały do zabiegów mogą być podgrzewane i utrzymywane w odpowiedniej temperaturze.

Głowica ciepło/zimno - wpływa na skórę, układ nerwowy, tkankę mięśniową, działa uspokajająco, relaksuje. Wpływa na układ limfatyczny, krwionośny, uelastycznia, poprawia elastyczność i jędrność, pomaga zwalczyć cellulit.

Galwanizacja - przy nerwobólach, nerwicach naczyńniowych skóry, odmrożeniach, trądziku różowatym, rozszerzeniu naczyń krwionośnych (teleangiektazje), skóra atroficzna, ziemista.

Ultradźwięki - mają zastosowanie w likwidacji drobnych zmarszczek, rozstępów, tkanki tłuszczowej, cellulitu oraz blizn. Dodatkowo odświeżają i oczyszczają skórę. Zabieg ten jest bezbolesny i może być wykonany na wrażliwej skórze.

Peeling kawitacyjny- ma zastosowanie przy usunięciu zanieczyszczeń, sebum oraz złuszczeniu zrogowaciałych komórek naskórka, dotlenieniu skóry, wzrostach przekrwienia w warstwach naskórka, poprawie produkcji kolagenu i elastyny oraz nawilżeniu.

BIO face lifting - Służy do rozbijania tkanki tłuszczowej, cellulit. Podnoszenia owalu twarzy, piersi;

D`arsonval - przy leczeniu nerwobólów, świądu, przy zaburzeniach czucia, łojotoku, łysieniu plackowatym, pobudzeniu krążenia, przy dezynfekcji skóry, przed i po woskowaniu, po mechanicznym oczyszczaniu cery, przy opryszcze, przy makijażu permanentnym ust.

Lampa Wooda - służy do dokładnej diagnozy skóry.

Elektrokoagulator - doskonały do usunięcia włókniaków, kurzajek, brodawek.

Brush - wykorzystywany do demakijażu, peelingu, oczyszczaniu skóry.

<

Sposób użycia

Wapozon - Na oczyszczoną skórę twarzy nakładamy maskę do rozpułchniania, włączamy wapozon i ustawiamy czas. Gdy para zaczyna się ulatniać podstawiamy ramię w odległości bezpiecznej dla twarzy klienta. Jeśli jest taka potrzeba do zabiegu włączamy dodatkowo ozon. Jeżeli chcemy użyć funkcji aromaterapii należy do sitka umieszczonego w pokrywie włożyć wacik nasączony olejkiem eterycznym lub zioła.

Vacum- wybranym rodzajem bańki zasysamy skórę, pod wpływem ciśnienia skóra zostaje oczyszczona z zanieczyszczeń.

Spray- do buteleczki wlewamy tonik, mgiełkę bądź inną substancję. Z odpowiedniej bezpiecznej odległości rozprowadzamy na skórze.

Lampa lupa - po podłączeniu, włączamy lampę. Kierując ją na dany fragment skóry, obserwujemy i diagnozujemy cerę.

Koloroterapia - wybieramy odpowiedni kolor, przykładamy głowicę do skóry i wykonujemy koliste ruchy. Podczas zabiegu możemy zmieniać kolory.

Mikrodermabrazja - oczyszczamy twarz klienta, następnie włączamy aparaturę, nakładamy sterylną nakładkę (głowicę), ustawiamy siłę ciśnienia. Następnie przystawiamy dyszę do części ciała klienta i zaczynamy zabieg przesuwając głowicą po skórze. Może wystąpić delikatne zaczerwienienie na skórze. Zabieg możemy wykonać na twarzy lub ciele.

Sterylizator UV z funkcją podgrzewania ręczników - przycisk POWER uruchamia podgrzewanie ręczników, materiałów. A przycisk OZON włącza światło ultrafioletowe - sterylizację.

Głowica ciepło/zimno - do twarzy klienta przykładamy głowicę. Ustawiamy ją na ciepłą bądź zimną, po czym delikatnie kolistymi ruchami jeździmy po skórze. Wcześniej można na skórę nanieść dowolny produkt, który chcemy, aby penetrował w głąb skóry.

Galwanizacja -Klientce wręczamy elektrodę bierną a do oczyszczonej, wilgotnej twarzy przykładamy elektrodę czynną i przesuwamy ją powoli po całej powierzchni skóry. Kolejną alternatywą dla takiego zabiegu może być wykonanie galwanizacji na masce w płacie. Na twarz nakładamy odpowiednią do skóry i zabiegu maskę, po czym ustawiamy aparat do galwanizacji. Przykładamy elektrodę do twarzy i przesuwamy po wilgotnej masce. Klientka może czuć metaliczny posmak w ustach.

Ultradźwięki - Zabieg z ultradźwiękami polega na wtłaczaniu za pomocą głowicy substancji czynnych. Na skórę nakładamy odpowiednią ampułkę, na nią nanosimy żel do ultradźwięków, dzięki któremu fala przeniknie w głąb skóry. Zabieg wykonujemy przesuwając głowicą powoli po skórze ruchem okrężnym. Podczas zabiegu wytwarzane jest przyjemne ciepło, które relaksuje oraz przyspiesza metabolizm, przez co cenne związki wnika głębiej w skórę.

Peeling kawitacyjny - Skórę przecieramy wilgotnym wacikiem nasączonym tonikiem lub wodą. Szpatułkę nachylamy pod kątem 45 stopni do skóry, po czym delikatnie, nie dociskając przesuwamy po skórze za zwilżonym wacikiem. Intensywność dobieramy do odczuć klienta. Klient może czuć delikatne pizczenie w uszach lub też metaliczny posmak w ustach.

BIO face lifting - do skóry przykładamy odpowiednie głowice i przesuwamy wzdłuż mięśnia.

D`arsonwal - Na oczyszczoną skórę przykładamy pelotę, następnie włączamy urządzenie i przejeżdżamy pelotą po skórze. Podczas zabiegu wytwarza się ozon który działa bakteriobójczo i dezynfekująco na skórę. W zależności od zabiegu używamy różnych pelot. Do twarzy i ciała używamy grzybka, do miejsc trudno dostępnych łyżeczki lub punktowej.

Lampa Wooda - Lampę należy stosować w zaciemnionym pomieszczeniu lub należy nałożyć na lampę sukno. Włączamy urządzenie i obserwujemy przez szybkę jaki kolor ma nasza skóra. W przypadku grzybicy w zaciemnieniu będzie widać silne światło fluoryzujące, natomiast jeśli widoczny będzie kolor niebieski oznacza to, że skóra jest normalna, skóra sucha, odwodniona światło fioletowe, skóra tłusta- pomarańczowe, skóra trądzikowa- żółte, nadmierne rogowacenie skóry - białe, przebarwienia, ciemne plamy- brązowe. Paznokcie powinny pojawić się jasno białe.

Elektrokoagulator - Zabieg ten jest bezbolesny oraz krótki, nie rani ciała, przez co nie ma wysięku krwi. Polega na dotknięciu (nie wkłuciu) elektrody do powierzchni naskórka w miejscu zmiany skórnej, dzięki czemu ścina się białko. Uszkodzony zostaje naskórek, dlatego proces gojenia jest szybszy. Może pojawić się strupek, nie należy go jednak zrywać, a należy poczekać na moment, w którym odpadnie sam.

Brush - wybraną szczoteczkę zwilżamy i umieszczamy w rękojeści. Przykładamy do twarzy, włączamy i okrężnymi ruchami masuje twarz.

Elementy składowe

- baza,

-
- lampa lupa,
 - wapozon,
 - lampa Wooda,
 - rękojeści do: galwanizacji (rolka, 2 mniejsze grzybki, elektroda bierna);
 - ultradźwięków (płaska, stożkowa);
 - szpatuła peelingu kawitacyjnego;
 - 4 rękojeści do BIO liftingu (2 mniejsze i 2 punktowe);
 - rękojeść do D`arsonvala i 3 peloty (grzybek, łyżka, punktowa);
 - głowica koloroterapii;
 - rękojeść do elektrokoagulatora z zestawem igieł;
 - pistolet do Brush wraz z 5 końcówkami;
 - głowica ciepło/zimno;
 - sterylizator UV z podgrzewaczem ręczników;
 - 2 dysze mikrodermabrazji,
 - wężyk, jednorazowe bawełniane filtry
 - 9 głowic do mikrodermabrazji;
 - 2 plastikowe buteleczki do spray;
 - 3 szklane bańki do vacuum;
 - kabel zasilający,
 - instrukcja obsługi.

Parametry techniczne

Zasilanie : 230V / 50Hz

Pobór Mocy : 1100W

Waga 50kg

Wymiary urządzenia : 58x52x120,5cm

Gwarancja 1 rok

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Stan: Nowy

Płeć: Produkt uniseks