

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/urzadzenie-kosmetyczne-galwan-xilia-818-p-44311.html>



Urządzenie kosmetyczne galwan XILIA 818

Cena	6 065,13 zł
Numer katalogowy	1038542555
Kod producenta	CNXILIA818
Kod EAN	5907589355437

Opis produktu

Łatwe w obsłudze urządzenie kosmetyczne profesjonalnej, cenionej w Europie włoskiej formy Over Line, służące do wykonywania zabiegów z wykorzystaniem prądu stałego. Posiada unikalny design doskonale pasujący do każdego gabinetu kosmetycznego, Spa & Wellness. Wymienne końcówki pozwolą na urozmaicenie zabiegu.

Galwanizacja to zabieg elektrolecniczy, który wykonujemy za pomocą galwanu z wykorzystaniem prądu stałego. Do zabiegu używamy elektrod. Przesuwając elektrodę po powierzchni skóry dochodzi do przemieszczenia jonów wewnątrz organizmu, co powoduje, przekrwienie skóry i poprawę napięcia. Wszystkie przyciski oraz monitor znajdują się z przodu ułatwiając pracę kosmetyczce.

Galwanizacja ma zastosowanie:

- przy nerwobólach,
- nerwicy naczyniowej skóry,
- odmrożeniach,
- trądziku różowatym,
- rozszerzonych naczyniach krwionośnych (teleangiektazje),
- skórze atroficznej i ziemistej,
- po zabiegu oczyszczania cery,
- przy rozszerzonych porach oraz przed nałożeniem maski kosmetycznej.

Przeciwwskazania:

- stany gorączkowe,
- ropne i zapalne stany skóry i tkanek miękkich,
- uprzednie stosowanie maści, kremów,
- uczulenie na prąd galwaniczny,
- ciąża,
- zaburzenia czucia,
- przerwana ciągłość skóry,
- nowotwory,
- metalowe części w organizmie
- zaburzenia akcji serca.

Sposób użycia:

Na oczyszczoną skórę twarzy nakładamy maskę zwilżoną roztworem soli fizjologicznej, następnie do ręki klienta dajemy elektrodę bierną owiniętą mokrym wacikiem. Elektrodę czynną przykładamy do twarzy i delikatnie przesuwamy po skórze, intensywność dobieramy do odczuć klienta. Zabieg trwa około 15-20 minut. Powinien być wykonany w serii. Kolejną alternatywą dla takiego zabiegu może być wykonanie jonoforezy: na aparacie włączamy opcję jonoforezy, następnie na twarz nakładamy maskę lub substancje odżywcze (produkty powinny być elektrolityczne muszą dysocjować na jony dodatnie i ujemne podczas przepływu prądu) i wykonujemy zabieg jak przy galwanizacji. Klientka może czuć metaliczny posmak w ustach.

Elementy składowe:

- baza,
- ręczka z wymiennymi uchwytami do jonoforezy,
- elektroda bierna,
- instrukcja obsługi
- 2 lata gwarancji

Parametry techniczne:

- Zasilanie: 230V 50-60Hz
- Pobór mocy: 12V
- Wymiary: 360x315x170mm