

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/wozek-do-urzadzen-kosmetycznych-xilia-p-44280.html>



## Wózek do urządzeń kosmetycznych XILIA

Cena	<b>4 012,67 zł</b>
Numer katalogowy	<b>1038543173</b>
Kod producenta	<b>CNXILIA-CARRELLO</b>
Kod EAN	<b>5907589354423</b>

### Opis produktu

Łatwe w obsłudze, nowoczesne, profesjonalne urządzenie włoskiej, cenionej w Europie firmy Over Line, do masażu podciśnieniem. Posiada unikalny design doskonale pasujący do każdego gabinetu kosmetycznego, Spa & Wellness.

Dzięki dotykowemu wyświetlaczowi oraz zaprogramowanej instrukcją do zabiegu, obsługa jest niezwykle łatwa. Dodatkowo przy użyciu kart magnetycznych, można zaprogramować serię zabiegów dla każdego klienta z osobna. Urządzenie posiada 8 zaprogramowanych programów. Ciśnienie można regulować od 30 mmHg do 120 mmHg. Aparat praktycznie sam wykonuje pracę, stopniowo przesuwając ciśnienie wewnątrz kombinezonu. Zabieg przyjemny, dodatkowo rozluźnia, odtoksycznia, usuwa obrzęki oraz wodę z organizmu, stosuje się go na opuchnięte nogi. Kosmetyczka jedynie nadzoruje pracę, w tym samym czasie może wykonać klientce jakiś inny zabieg.

#### Zastosowanie:

Do wykonywania bezbolesnego i relaksującego masażu podciśnieniem podobnego do masażu ręcznego. Posiada specjalnie dzielony kombinezon na nogi i ramiona wydzielony na sekcje. Stymuluje krążenie krwi oraz dzięki masażowi limfatycznemu poprawia krążenie limfy. Zmniejsza cellulit i usuwa nadmiar płynów z organizmu. Działa również przy zastojach naczyń chłonnych.

**Przeciwwskazania:** choroby nowotworowe, ostre stany zapalne, pourazowe, podwyższona ciepłota ciała, zakrzepowe zapalenie żył.

Zabieg można stosować 2-3 razy w tygodniu.

#### Sposób użycia:

Zabieg polega na nałożeniu klientce odpowiedniego kombinezonu podłączonego do urządzenia. Powietrze powstające pod kombinezonem jest kontrolowane przez mikroprocesor, który steruje ilością ciśnienia wewnątrz sektorów podlegających zmianie. Poprzez zmianę i odpowiednie ustawienie ciśnienia uzyskuje się perystaltyczne ciśnienie, i jak fala owija się równomiernie wokół kończyny od dołu do góry, co poprawia krążenie, usuwa nadmiar płynów i dotlenia skórę. Programy mogą się różnić według potrzeb i danego problemu klienta. Kombinezon można zastosować na całe ciało lub tylko na nogi lub ręce. Po zabiegu widoczne są efekty braku obrzęku oraz rozluźnienia. Wykaz programów: klasyczny perystaltyczny program, drenaż limfatyczny program na cellulit, perystaltyczny program drenażu, perystaltyczny program na ramię, stały program podciśnienia na ramię.

#### Elementy składowe:

Baza, opcja: wózek, półka i szafka, kombinezon na nogi i ramiona, bandaże, folia, instrukcja obsługi, gwarancja oraz kabel zasilający.

#### Parametry techniczne:

Wymiary: D400x S350x W150mm  
Zasilanie: 230V 50/60 Hz  
Pobór mocy: 60 W